

Tosti	ISTRUZIONI DI USO E MANUTENZIONE DPI VISIERA	Rev.0 del 08/04/2020
--------------	--	----------------------

ISTRUZIONI DI USO E MANUTENZIONE DPI VISIERA DI PROTEZIONE CONTRO GOCCIOLINE E SPRUZZI DI LIQUIDI

Immagazzinamento: L'immagazzinamento del prodotto non richiede attenzioni particolari e può avvenire nelle modalità di buona norma.

Impiego del prodotto: Il prodotto può essere impiegato come DPI di protezione contro goccioline o spruzzi di liquidi. Le modalità di indosso e regolazione sono intuitive e consentono la disposizione del DPI garantendo la protezione con il grado di comfort adeguato. Prima dell'utilizzo rimuovere la pellicola protettiva dallo schermo.

Pulizia del DPI: Per la pulizia e la disinfezione possono essere utilizzati i prodotti elencati nel seguito.

Alcool Etilico (Concentrazione inferiore o uguale al 96%)

Etanolo (Concentrazione inferiore o uguale al 96%)

Glicerina

Sapone

Ipoclorito di sodio (Concentrazione inferiore al 15% in soluzione acquosa)

Per l'utilizzo in sicurezza dei prodotti l'utilizzatore deve osservare le modalità riportate nella scheda di sicurezza del prodotto. Qualora la pulizia sia eseguita con l'ausilio di un panno questi deve essere morbido in modo da non rigare lo schermo. Il prodotto non necessita di operazioni di manutenzione o di revisione.

Prove/controlli e collaudi effettuati sul DPI; Sul prodotto sono state effettuate con esito positivo le prove/controlli/collaudi riportate alla UNI 166:2004 applicabili per il tipo di uso per il quale è stato costruito "Protezione contro goccioline e spruzzi di liquidi".

Accessori/ricambi; Il DPI non prevede l'installazione di nessun accessorio. Sul DPI può essere sostituito lo schermo facciale. La sostituzione deve avvenire con schermo nuovo prodotto da Tosti srl. La sostituzione può avvenire senza l'utilizzo di utensili smontando manualmente le clips di trattenuta dello schermo, togliendo lo schermo presente, ponendo il nuovo schermo in posizione e premendo le clips nei fori di fissaggio fino alla completa penetrazione del gambo.

Limiti di utilizzo: Il DPI deve essere utilizzato esclusivamente per la protezione contro goccioline e spruzzi di liquidi. Non è consentito nessun uso diverso da quello previsto.

Scadenza del prodotto; Il prodotto ed i suoi componenti, nelle normali condizioni di utilizzo, non sono soggetti ad invecchiamento e/o a scadenza.

Imballaggio e trasporto; Il prodotto viene fornito in idoneo imballaggio dal produttore. Non sono richieste condizioni particolari o limitazioni per il trasporto dovute al DPI.

Marcature; Il prodotto è marcato come richiesto dalla Norma UNI 166:2004. Sulla marcatura, oltre al numero riportante la norma di riferimento è riportato il numero 3 che significa che il DPI è realizzato per "protezione contro goccioline e spruzzi di liquidi".

Rischio da cui il DPI è destinato a proteggere; Il DPI in oggetto è una protezione oculare contro il rischio di contatto degli occhi con goccioline e spruzzi di liquidi che abbiano contenuto tale da costituire elementi di rischio chimico e/o biologico.

Le presenti istruzioni d'uso sono redatte ai sensi del regolamento UE 2016/425 del 9 Marzo 2016. Per la progettazione, la fabbricazione, le prove/controlli/collaudi del prodotto ci si è riferiti al regolamento UE

Tosti	ISTRUZIONI DI USO E MANUTENZIONE DPI VISIERA	Rev.0 del 08/04/2020
--------------	--	----------------------

2016/425 del 9 Marzo 2016, alle norme UNI EN 166:2004 ed alle parti applicabili richiamate della UNI EN 166:2004 della UNI EN 168:2003.

Prodotto da:

Tosti srl – via del Gallaccino 17° - 58033 Castel Del Piano (GR) Italy

Tel. +39 0564 955358 – Fax +39 0564 956681 - www.tostisrl.it